

Flexineb to nebulizator MESH tzn. membranowo - siateczkowy.



Pojemnik nebulizacyjny Flexineb ulega zużyciu. Producent zaleca szczególną dbałość o ten element zestawu.

Wymagane jest prawidłowe użycie i prawidłowe czyszczenie.

Instrukcja czyszczenia dostępny na [YouTube](#)

- 🚩 Pojemnik nebulizacyjny Flexineb czyść niezwłocznie (od razu!) po każdym użyciu!
- 🚩 Umieść zatyczkę na złącze, aby zabezpieczyć elementy elektroniczne przed wilgocią.
- 🚩 Producent do mycia pojemnika Flexineb poleca [Frosch Hygiene Cleaner](#).

Po aplikacji Frosch zamknij niebieską pokrywę i wstrząśnij. Następnie 2-3 razy naciśnij niebieską pokrywę (zabieg mający na celu osiągnięcie efektu „pompki”), wylej zawartość.

A teraz wlej [wodą destylowaną](#) (przepłucz pojemnik) i wylej zawartość.

- 🚩 Napełnij pojemnik ponownie niewielką ilością wody destylowanej, zamknij niebieską pokrywę i włącz sterownik na około 10 sekund. Ta procedura usuwa wszelkie pozostałości i czyści membranę.
- 🚩 Pozostaw pojemnik do wyschnięcia, z otwartą pokrywką, w temperaturze pokojowej.

UWAGA! Nigdy nie zanurzaj pojemnika Flexineb w wodzie lub roztworach chemicznych. Może to trwale uszkodzić metalową membranę lub skrócić jej żywotność. Nie używaj ostrych narzędzi do czyszczenia metalowej siatki w pojemniku nebulizacyjnym.

W celu zapewnienia ciągłości terapii zdecydowanie zaleca się posiadanie zapasowych pojemników.

W trosce o środowisko dbamy o prawidłowy proces utylizacji zużytych elementów Flexineb. Zatem nie wyrzucaj do kosza, skontaktuj się z nami. ♻️ Zadbajmy o Naszą Planetę!!

